

www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

MOUFLES DE SÉCURITÉ

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


baleinage
aluminium
intégré

À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE
INDIQUÉ :
ELLES EMPÊCHENT LE PATIENT DE
S'ENLEVER LES DISPOSITIFS DE
SOINS AINSI QUE LES
PROTECTIONS CONTRE L'INCON-
TINENCE.

Les moufles de sécurité empêchent le patient de s'enlever les dispositifs de soins ainsi que les protections contre l'incontinence.

La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baleinage aluminium intégré évite la flexion de la main.



LMMFL-HP



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



MOUFLES DE SÉCURITÉ

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Complexage polyester/ouate de polyester
soudé aux ultra-sons
Filet 100 % polyester
Biais 100 % coton
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon
Baleinage aluminium

- Insérer la main du patient dans une moufle, le filet sur le dessus de la main.
- Fermer la boucle nylon puis régler le serrage.
- Assurer la fermeture avec l'auto-agrippant.